



## SELBSTTEST-GEBRAUCHSANWEISUNG (JOINSTAR)




1. Führen Sie die gesamte weiche Spitze des Stäbchens vorsichtig in Ihr Nasenloch ein, um die hintere Oberfläche der Nase zu erreichen. Drehen Sie das Stäbchen 5-mal gegen die Innenwand ihres Nasenlochs für ca. 15 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch.



6. Lagerhinweis: Lagern Sie den Test bei 2 °C bis höchsten 30 °C und bringen Sie den Testkit vor Durchführung auf Raumtemperatur.



2. Öffnen Sie das Röhrchen mit der Flüssigkeit und weichen Sie das Stäbchen in der Flüssigkeit ein. Drehen Sie das Stäbchen 10-mal in der Flüssigkeit.

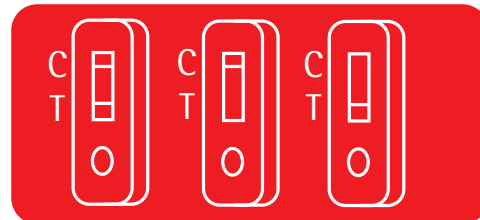

Positiv      Negativ      Ungültig



3. Drücken Sie das Röhrchen im Bereich des Stäbchenkopfes fest zusammen und ziehen Sie das Stäbchen heraus damit die Flüssigkeit im Röhrchen bleibt und schrauben Sie das Probenröhrchen zu.



4. Nehmen Sie die Testkassette und legen Sie diese auf eine saubere ebene Oberfläche. Geben Sie 3 Tropfen der Probe senkrecht in das kleinere Probenloch.



Röhrchen/Extraktionspuffer



Stäbchen/Tupfer



5. Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Wenn nach 20 Minuten oder länger kein Ergebnis erscheint ist es ungültig.



Testkassette



Weitere Informationen zur COVID-19 Erkrankung erhalten Sie unter:

Land Vorarlberg: [www.vorarlberg.at/corona](http://www.vorarlberg.at/corona)  
Bundesministerium: [www.sozialministerium.at](http://www.sozialministerium.at)